

BioCer

100%
Reabsorvível

Produzido na
ALEMANHA

HaemoCerTM PLUS
Pó Hemostático
Natural - Seguro - Efetivo



αnext

HaemoCer™ PLUS

Pó Hemostático



HaemoCer™ PLUS é um pó hemostático absorvível feito à base de plantas e que não contém componentes animais ou humanos. Este produto é uma tecnologia criada através do processo de engenharia de polissacarídeos reabsorvíveis da BioCer (PURE).

Estudos independentes demonstram que os hemostáticos à base de plantas (polissacarídeos) reduzem as adesões pós-operatórias.

A hemostasia ocorre rapidamente por meio da aceleração da cascata de coagulação fisiológica, sem a participação de ingredientes químicos ou farmacêuticos

Natural

- À base de plantas
- Não contém componentes animais ou humanos
- Reabsorção completa

Seguro e Eficaz

- Dupla capacidade de absorção
- Redução da necessidade de cauterização
- Redução de transfusões homólogas e doações de sangue

Prático

- Não possui a necessidade de armazenamento especial ou descongelamento
- Embalagem compacta, reduzindo o volume de armazenamento

Natureza refinada

Incorpora um processo sofisticado de reticulação do polímero (PURE) que cria partículas ultra hidrofílicas e biocompatíveis.

Duplo modo de ação: após o contato com o sangue, HaemoCer™ PLUS acelera o processo natural da cascata de coagulação desidratando rapidamente o sangue e catalisando a concentração de plaquetas, glóbulos vermelhos e proteínas. Em seguida, forma uma matriz gelatinosa e robusta proporcionando uma barreira mecânica em sangramentos de maior volume.

HaemoCer™ PLUS é rapidamente absorvido pela amilase (entre 24h e 48h) sem deixar resíduos.

Facilidade de uso - Técnica de aplicação



Seque

Remova o excesso de sangue acumulado por meio de sucção ou gaze.



Aplique

O HaemoCer™ PLUS diretamente em toda a área cruenta.




Pressione

Aplique leve compressão sobre a área usando uma gaze seca. Pressione por até dois minutos em caso de hemorragia profusa.



Irrigar

Umedeça cuidadosamente antes de remover a gaze para garantir que a matriz gelatinosa permaneça no local tratado

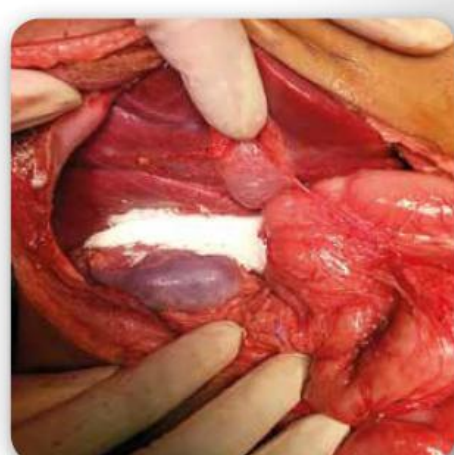

HaemoCer™ PLUS é versátil e pode ser utilizado:

- No tratamento de sangramentos difusos e localizados
- Nos sangramentos em torno de linhas de sutura
- Na substituição de cola de fibrina para hemostasia em cirurgia vascular
- Na substituição óssea em sangramento ósseo
- Como alternativa para a reduzir a necessidade de cauterização

Campos de aplicação:

- Neurocirurgia
- Cirurgia Cardíaca, Vascular e Torácica
- Ortopedia
- Queimadura
- Cirurgia Plástica
- Cirurgia Geral
- Transplante
- Traumatologia
- Cirurgia de Tumores
- Cirurgia Oral e Maxilofacial
- Cirurgia Otorrinolaringológica
- Urologia / Ginecologia
- Cirurgia Pediátrica



HaemoCer™ PLUS Está disponível nas seguintes apresentações:

HFP201	1g	5 pcs
HFP203	3g	5 pcs
HFP205	5g	5 pcs
HFZ101	440 mm	5 pcs



100%
Reabsorvível

Produzido na
ALEMANHA



Importador Exclusivo

αnext

☎ | 11 5572-6457

☎ | 11 98829-9300

🌐 | nextimplantes.com.br

in | [next-implantes](https://www.linkedin.com/company/next-implantes)

📷 | [next_implantes](https://www.instagram.com/next_implantes)